



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

## Stanovisko k možnosti resterilizace antidekubitních polohovacích pomůcek

Národní referenční centrum pro dezinfekci a sterilizaci

### Možnosti resterilizace antidekubitních polohovacích pomůcek:

- výrobce musí deklarovat, zda se pomůcka používá jednorázově a individuálně, nebo je k opakovanému použití / či ji lze použít opakovaně použít;
- při opakovaném použití je nutné textilní materiály nejdříve vyprat nejlépe procesem termodezinfekce nebo procesem chemotermické dezinfekce a usušit, případně vyžehlit;
- pokud to materiál snese, byla by vhodná sterilizace v parních sterilizátorech při parametrech doporučených pro sterilizaci textilu (121°C/20 min.);
- radiační sterilizace se používá pro sterilizaci nově vyrobených zdravotnických prostředků, u kterých se předpokládá, že nepřišly do styku s biologickým materiálem, není doporučovaná pro jakoukoli resterilizaci;
- nemocniční lůžka, matrace a lůžkoviny lze, pokud to doporučí /bez jejich/ výrobce, dezinfikovat v parních dezinfektorech.

MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.

NRL pro dezinfekci a sterilizaci